

Produktinformation

Charger Plus MNR T R

Charger Plus för hörapparaten Bernafon Alpha miniRITE T R är utformad för att vara enkel att använda, både hemma och när man befinner sig på resa. Laddarens lock fungerar som skydd och förvaring för hörapparaterna och det laddbara inbyggda litiumjonbatteriet gör att Charger Plus fungerar som en power bank när ingen annan strömkälla finns tillgänglig.

Laddaren använder induktionsteknik som trådlöst kan ladda två hörapparater via induktionsspolar. Dessutom finns en magnetanslutning som gör att hörapparaterna sitter stabilt i laddningsportarna. När hörapparaterna placeras i laddaren påbörjas laddningen automatiskt. Hörapparaterna sätts PÅ när de tas ur laddaren.



Ingår i förpackningen

- Bruksanvisning
- Strömadapter
- USB-sladd

Om hörapparaternas batterier är helt urladdade är normal laddningstid:

- 3 h = Full laddning
- 1 h = 50 % laddning
- 0,5 h = 25 % laddning

¹ Strömadaptern varierar från land till land

Charger Plus MNR T R – Teknisk information

Charger Plus MNR T R

Tillverkad för/kompatibilitet	Alpha, miniRITE T R
Mått	Höjd 76,4 mm/Bredd 47,2 mm/längd 95 mm
Vikt	180 gram (6.4 oz)
Färg	Svart
Elkontakt	USB A
Statusindikation	LED-lampa på laddaren när den är ansluten till en strömkälla: Indikerar laddningsstatus för power bank. LED-lampa på laddaren när den inte är ansluten till en strömkälla: Indikerar batterinivån för power bank. LED-indikator på hörapparaten under laddning: Indikerar laddningsläge
Hörapparaternas laddningstid	Max 3 timmar beroende på batteriets initialstatus (Temperatur: +10 °C till +35 °C (+50 °F till +95 °F)) Max 4 timmar beroende på batteriets initialstatus (Temperatur: +5 °C till +10 °C (+41 °F till +50 °F)) och +35 °C till +38 °C (+95 °F till +104 °F)
Laddningstid för power bank-batteri	Max 4 timmar beroende på batteriets tillstånd Temperatur: +10 °C till +35 °C (+50 °F till +95 °F)
Strömkälla	Medföljande strömförsörjningsenhet
Ingångsspänning	5 V DC
Ingångsström	Max 1A (vid laddning av internt batteri och 2 hörapparater)
Sladd	Avtagbar sladd, längd 150 cm
Ansluten till extern utrustning	När apparaten är ansluten till nätströmsdriven utrustning, måste denna utrustning överensstämma med IEC 62368-1 eller motsvarande säkerhetsstandarder.

Användningsförhållanden

Driftsförhållanden:	Temperatur: +5 °C till +38 °C och +41 °F till +100 °F Relativ luftfuktighet: 5 % till 93 %, icke-kondenserande
Förvaring och transport	Temperatur: -25 °C till +60 °C Relativ luftfuktighet: 5 % till 93 %, icke-kondenserande
Atmosfärstryck	700 hPa till 1060 hPa

Tekniska data strömförsörjningsenhet

Ingångsspänning	100 – 240 V AC
Ingångsfrekvens	50 – 60 Hz
Utgångsspänning	5 V DC
Utgångsström	1 A



Tillverkare

SBO Hearing A/S

Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Denmark

Huvudkontor

Bernafon AG

Morgenstrasse 131
3018 Bern
Switzerland
Telefon +41 31 998 15 15
info@bernafon.com
www.bernafon.com