

signia

StreamLine Mic

Bruksanvisning



Innehåll

Innan du börjar	5
<hr/>	
Inledning	5
Ingår i förpackningen	10
Komponenter	12
Komma igång	14
<hr/>	
Laddning	14
Parkoppla hörapparater	17
Parkoppla din smartmobil eller musikspelare	19
Ta bort parkopplingar	21

Daglig användning	22
Slå på/av	22
Justera volymen	23
Stänga av hörapparaternas mikrofoner	24
① Ringa telefonsamtal	25
② Lyssna på musik	29
③ Använda som fjärrmikrofon	31
④ Använda som fjärrkontroll	34
Viktig säkerhetsinformation	35
Personsäkerhet	35
Produktsäkerhet	42

Viktig information	45
Avsett ändamål/Avsedd användning	45
Översikt över status- och strömindikatorer	46
Förklaring av symboler	50
Underhåll och skötsel	52
Teknisk information	53
Återvinningsinformation	55
Försäkran om överensstämmelse	56

Innan du börjar



VARNING

Läs användarguiden noggrant och fullständigt och följ säkerhetsinformationen i detta dokument för att undvika materiella skador eller personsador.

Inledning

StreamLine Mic använder Bluetooth®* teknik för att tillhandahålla följande funktioner.


* Ordmärket Bluetooth och logotyperna ägs av Bluetooth SIG, Inc. All användning av sådana märken av produktens tillverkare sker under licens. Andra varumärken och handelsnamn tillhör sina respektive ägare.

① Headset för mobiltelefoner

Ljud från din mobiltelefon strömmas till dina hörapparater via StreamLine Mic.

Din röst fångas upp av StreamLine Mic och skickas till din mobiltelefon.


Läs mer i avsnittet "Ringa telefonsamtal".

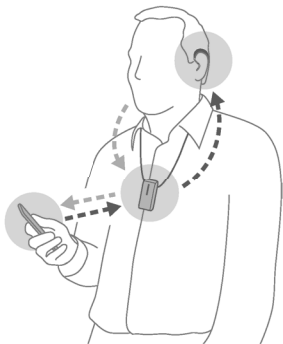

② Hörlurar för musik

Musik från din mobiltelefon eller annan Bluetooth-enhet strömmas till dina hörapparater via StreamLine Mic.


Läs mer i avsnittet "Lyssna på musik".

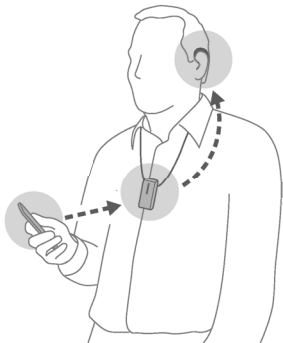

③ Fjärrmikrofon

En utvald talares röst överförs trådlöst **från** StreamLine Mic **till** dina hörapparater.

Läs mer i avsnittet "Använda som fjärrmikrofon".

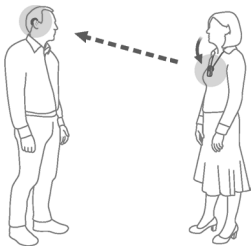


④ Fjärrkontroll

När StreamLine Mic inte strömmar ljud kan den användas som fjärrkontroll för dina hörapparater.






Läs mer i avsnittet "Använda som fjärrkontroll".

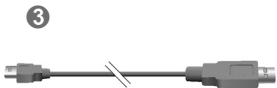
Ingår i förpackningen

- ① StreamLine Mic
- ② Snören (olika längder)
- ③ USB-kabel för laddning
- ④ USB-strömkabel och strömkontakt (landsspecifika)



Komponenter

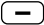
- 1 Mikrofoner
- 2 Strömindikator 
- 3 Statusindikatorer 
- 4 Klämman (roterande)
- 5 Flerfunktionsknapp 
- 6 Volymknappar  och 
- 7 USB-port för laddning


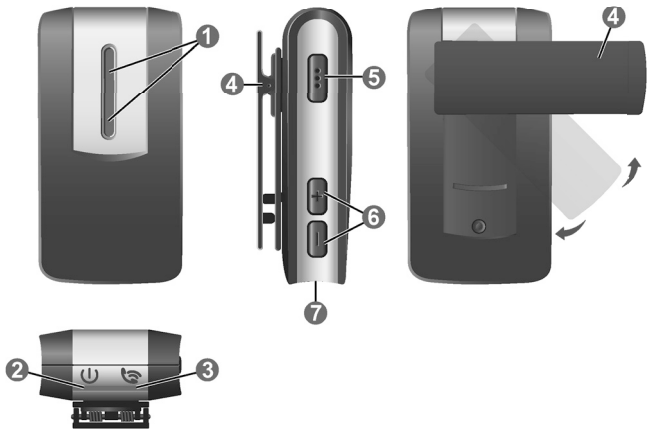


Komma igång


Laddning

StreamLine Mic är inte fulladdad vid leverans. Ladda upp den fullt före första användning.

När strömindikatorn  är röd har du ca. 30 minuter återstående streaming-tid.

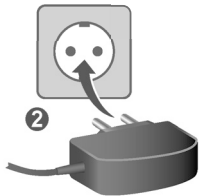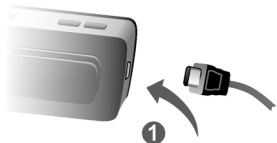

Strömindikatorn visar laddningsnivån:

	Beskrivning
Röd	Batteriets kapacitet är låg
Blinkar grönt	Laddning (StreamLine Mic är på)
Blinkar orange	Laddning (StreamLine Mic är avstängd)
Grön som avtar	Laddning är avslutad (StreamLine Mic är på)
Orange	Laddning är avslutad (StreamLine Mic är avstängd)

Övrig information:

- Vanligtvis tar en full laddning två timmar.
- Kontrollera att laddaren är lättillgänglig så att det går att koppla bort den från eluttaget vid behov.



OBSERVERA

- ▶ Vid laddning ska laddningsindikatorn lysa enligt beskrivningen i denna bruksanvisning. Om laddningsindikatorn inte lyser kopplar du bort enheten från laddaren och kontaktar din audionom.








OBSERVERA

- ▶ Vid laddning, StreamLine Mic använd den medföljande originalnätadaptern 5,0 V/1A, CE- och säkerhetsmärkt.

Parkoppla hörapparater

Dina hörapparater måste parkopplas **en gång** med StreamLine Mic. Efter det sparas parkopplingen i hörapparaterna, som minns parkopplingen varje gång de slås på.

- ▶ Försäkra dig om att StreamLine Mic är avstängd: Håll  -knappen nedtryckt tills strömindikatorn  stängs av. Det tar cirka 6 sekunder.
- ▶ Stäng av hörapparaterna och slå sedan på dem igen: Öppna och stäng batterifacken. Om dina hörapparater inte har ett batterifack stänger du av och slår på dem enligt beskrivningen i hörapparaternas bruksanvisning. Hörapparaterna är nu klara för parkoppling. Du har 3 minuter på dig att slutföra parkopplingen.

- ▶ Slå på StreamLine Mic: Håll  -knappen nedtryckt tills strömindikatorn  grön. Det tar cirka 3 sekunder.
Statusindikatorn  blinkar gult.
- ▶ Placera båda hörapparaterna nära StreamLine Mic (maxavstånd 20 cm).
Parkopplingsprocessen startar automatiskt.
Parkopplingen är slutförd när statusindikatorn är gul.



Parkoppla din smartmobil eller musikspelare

Din smartmobil (eller musikspelare) måste parkopplas en gång med StreamLine Mic. Efter detta upprättas anslutningen automatiskt när StreamLine Mic slås på och befinner sig inom användningsradien.

- ▶ Och ned knappen  och knappen  samtidigt tills statusindikatorn  blinkar blått. Detta tar cirka 6 sekunder.

StreamLine Mic är nu klar för parkoppling. Du har 3 minuter på dig att slutföra parkopplingen.

- ▶ Ställ in din smartmobil eller musikspelare på "sök efter andra Bluetooth-enheter". Se enhetens bruksanvisning.
- ▶ Välj "StreamLine Mic" från listan över valda enheter på din smartmobil eller musikspelare.

► Om det behövs så fyll i PIN "0000".

Parkopplingen är slutförd när statusindikatorn  är blå.

Övrig information

- StreamLine Mic kan **parkopplas** med upp till åtta Bluetooth enheter. Men endast en enhet kan vara **ansluten** i taget.
- Vid parkoppling med flera enheter:
 - StreamLine Mic ansluter till den första enheten den upptäcker.
 - För att byta till en annan enhet ska du inaktivera Bluetooth på enheten/enheterna som du inte vill använda för tillfället.

Ta bort parkopplingar

Gör så här för att ta bort alla parkopplingar av StreamLine Mic med mobiltelefoner och musikspelare:




- ▶ Stänga av StreamLine Mic: Håll  -knappen nedtryckt tills strömindikatorn  stängs av. Det tar cirka 6 sekunder.
- ▶ Håll  -knappen **och**  -knappen **och**  -knappen nedtryckta samtidigt i 10 sekunder.

När parkopplingarna tas bort blinkar statusindikatorn rött.
Dina hörapparater förblir parkopplade med StreamLine Mic.



Daglig användning

Slå på/av

Slå på:

- ▶ Håll  -knappen nedtryckt tills strömindikatorn  grönn. Det tar cirka 3 sekunder.
Statusindikatorn  blinkar gult till dess att hörapparaterna är anslutna.

Stänga av:

- ▶ Håll  -knappen nedtryckt tills strömindikatorn  stängs av. Det tar cirka 6 sekunder.


Justera volymen

Tryck på  eller  för att justera volymen.

Beroende på dina hörapparaters typ justeras volymen enligt följande:

- Alternativ 1: När ljud strömmas justeras endast ljudet från StreamLine Mic (telefonsamtal, tal eller musik). När inget ljud strömmas justeras hörapparaternas volym.
- Alternativ 2: Ljudet från StreamLine Mic (telefonsamtal, tal eller musik) och hörapparaternas volym justeras tillsammans.

Stänga av hörapparaternas mikrofoner

Håll  -knappen nedtryckt i 3 sekunder för att stänga av hörapparaternas mikrofoner. Endast ljudet från StreamLine Mic spelas i hörapparaterna.

Beroende på dina hörapparaters typ kan du slå på mikrofonernas ljud igen enligt följande:

- Alternativ 1: Håll  -knappen nedtryckt i 3 sekunder.
- Alternativ 2: Tryck på .

Denna funktion kanske inte är tillgänglig när StreamLine Mic används som fjärrmikrofon.

① Ringa telefonsamtal

Förutsättningar: StreamLine Mic måste vara ansluten till en mobiltelefon och bäras på rätt sätt.

Bära StreamLine Mic rätt






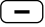
StreamLine Mic ska bäras enligt bilderna för bästa möjliga funktion. Det är viktigt att mikrofonen på StreamLine Mic pekar mot munnen och att StreamLine Mic inte täcks av kläder etc.

Maxavstånd:


- Mobiltelefon – StreamLine Mic: 10 m
- Hörapparater — StreamLine Mic: 2 m

Ta emot ett samtal

Du hör en ringsignal i hörapparaterna. Statusindikatorn  blinkar grönt.


- ▶ För att ta emot/avsluta samtalet trycker du på  eller tar emot/avslutar samtalet med din mobiltelefon.
Under ett samtal är statusindikatorn  grön.
- ▶ För att avvisa ett samtal håller du  -knappen nedtryckt i ca 3 sekunder.

Ringa ett samtal

När du ringer någon med din anslutna mobiltelefon strömmas samtalet automatiskt till hörapparaterna. Under ett samtal är statusindikatorn  grön.

Den här funktionen är inte tillgänglig när StreamLine Mic används som fjärrmikrofon.

Övrig information

- **Röstuppringning:** När den är ansluten till en mobiltelefon trycker du två gånger på  för att aktivera röstuppringning (om detta stöds av mobiltelefonen).
- För den här sortens anslutning använder StreamLine Mic Bluetooths handsfree-profil (HFP).

② Lyssna på musik

Om StreamLine Mic är ansluten till en musikspelare via Bluetooth spelas musiken automatiskt i hörapparaterna. Du behöver inte göra någonting på StreamLine Mic.


När musik strömmas är statusindikatorn  orange.

Maxavstånd:

- Musikspelare – StreamLine Mic: 10 m
- Hörapparater — StreamLine Mic: 2 m

Spela/stoppa musik


- ▶ Använd din mobiltelefon eller musikspelare för att spela/stoppa musiken.

För att stoppa musiken kan du även trycka  på StreamLine Mic.


Övrig information

- För den här sortens anslutning använder StreamLine Mic Bluetooths avancerade ljudistributionsprofil (A2DP, Advanced Audio Distribution Profile).
- Om musik strömmas från din mobiltelefon indikeras inkommande samtal när musiken spelas.

③ Använda som fjärrmikrofon

Fjärrmikrofonen startar inte automatiskt. Du måste växla till fjärrmikrofonläget med hjälp av  -knappen.

Bära StreamLine Mic rätt

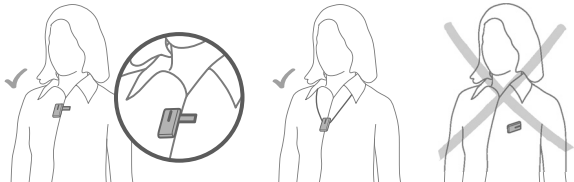

Talaren ska bära StreamLine Mic enligt bilderna för bästa möjliga funktion. Det är viktigt att mikrofonen pekar mot munnen och att StreamLine Mic inte täcks av kläder etc.

Maxavstånd:

- Hörapparater — StreamLine Mic: 20 m



Slå på fjärrmikrofonen

- ▶ Håll  nedtryckt i ca 3 sekunder.

Statusindikatorn  är magentafärgad. En bekräftelsesignal spelas i hörapparaterna.

Fjärrmikrofonerna är påslagna. Tal från personen som bär StreamLine Mic strömmas direkt till hörapparaterna.

Stänga av fjärrmikrofonen

- ▶ Håll  -knappen nedtryckt i ca 3 sekunder.
Statusindikatorn  är blå (ansluten till en mobiltelefon) eller gul (inte ansluten till en mobiltelefon).

Övrig information

- Vid användning av StreamLine Mic som fjärrmikrofon finns det ingen anslutning till mobiltelefonen. Särskilt inkommande samtal indikeras inte.
- StreamLine Mic har riktade mikrofoner, d.v.s. mikrofoner som fångar upp ljud från en viss riktning.

④ Använda som fjärrkontroll

StreamLine Mic kan användas som fjärrkontroll för dina hörapparater: Du kan justera volymen (se avsnittet ”Justera volymen”), stänga av hörapparaternas mikrofoner (se avsnittet ”Stänga av hörapparaternas mikrofoner”) eller byta till nästa lyssningsprogram (se nedan).

Maxavstånd:

- Hörapparater — StreamLine Mic: 2 m

Byta till nästa lyssningsprogram

▶ Håll  -knappen nedtryckt i ca 3 sekunder.

Den här funktionen är inte tillgänglig när StreamLine Mic används som fjärrmikrofon.

Viktig säkerhetsinformation

Personsäkerhet



FARA

Risk för kvävning!

Din apparat innehåller små delar som kan sväljas.

- ▶ Förvara hörapparaten, batterierna och tillbehören utom räckhåll för barn och personer med psykiska funktionshinder.
- ▶ Kontakta genast en läkare eller ett sjukhus om en del har svalts.



FARA

Risk för strypning!

- ▶ Kontrollera att nackbandet inte trasslar in sig, t. ex. vid flyttning av mekaniska delar av maskinen.
- ▶ Använd endast det medföljande löstagbara halsbandet. Det kommer automatiskt att lossa om det trasslat ihop sig.
- ▶ Nackbandet får inte användas av barn under tolv år.



FARA

Risk för elstöt!

- ▶ Använd inte uppenbart skadade apparater utan lämna tillbaka dem till utprovningstället.



FARA

Observera att icke godkända ändringar av apparaten kan orsaka skador på produkten eller personskador.

- ▶ Använd endast godkända delar och tillbehör. Be din audionom om hjälp.
- ▶ Gör inga ändringar på produkten utan godkännande från tillverkaren.
- ▶ Om produkten ändras måste lämplig kontroll och provning genomföras för att garantera att den är säker att använda.



FARA

Säker laddning av batterier med hjälp av en USB-kabel fastställs beroende på den externa utrustningen.

- ▶ När USB-kabeln är ansluten till utrustning som är ansluten till ett vägguttag ska den här utrustningen vara UL-godkänd eller uppfylla IEC 60065, IEC 60950 eller andra motsvarande säkerhetsstandarder.



FARA

Säker användning av den här enheten när den är ansluten till extern utrustning (via aux-kabel, via USB-kabel eller direkt) fastställs beroende på den externa utrustningen.

- ▶ När enheten är ansluten till extern utrustning som är ansluten till ett vägguttag måste utrustningen uppfylla IEC 60065, IEC 60950 eller andra motsvarande säkerhetsstandarder.



FARA

Explosionsrisk om det uppladdningsbara batteriet hanteras felaktigt.

- ▶ Du bör varken kortsluta, sticka håll på, krossa eller ta isär det uppladdningsbara batteriet.
- ▶ Lägg det inte i ugnen eller elden.
- ▶ Sänk inte ner den i vatten.
- ▶ Ladda det uppladdningsbara batteriet mellan 0 °C och 45 °C.
- ▶ För att laga eller byta ut det uppladdningsbara batteriet måste du returnera apparaten till din audionom.



FARA

Aktiva implantat

- ▶ Försiktighet måste iakttas med aktiva implantat. Om du har ett aktivt implantat ska du kontakta den implanterbara enhetens tillverkare för information om störningsriskerna.



FARA

Denna enhet kan störa mätapparater och elektronisk utrustning.

- ▶ Använd inte enheten på flygplan eller i områden där det är känsligt att använda elektronisk utrustning.



FARA

Explosionsrisk!

- ▶ Använd inte din apparat i explosiva atmosfärer (t. ex. i gruvområden).

Produktsäkerhet



OBSERVERA

- ▶ Skydda din apparat från kraftig värme. Förvara den inte i direkt solljus.



OBSERVERA

- ▶ Skydda dina apparater från hög fuktighet.



OBSERVERA

- ▶ Torka inte dina apparater i en mikrovågsugn.



OBSERVERA

Enheterna kan skadas av stark strålning, t.ex. vid undersökning med röntgen eller magnetröntgen eller om man befinner sig nära MRI- och CT-utrustning som inte används.

- ▶ Använd inte enheterna under dessa eller liknande procedurer.

Svagare strålning, t. ex. från radioutrustning eller flygplatssäkerhet, skadar inte enheterna.



I vissa länder finns restriktioner gällande användningen av trådlös utrustning.

- ▶ Kontakta de lokala myndigheterna för vidare information.



OBSERVERA

Dina enheter är utformade för att uppfylla internationella standarder gällande elektromagnetisk kompatibilitet men störningar från intilliggande elektroniska enheter kan förekomma. Gå bort från störningskällan i sådant fall.

Viktig information

Avsett ändamål/Avsedd användning

Den här enheten är avsedd att användas som trådlös mottagare och sändare av ljud mellan hörapparater och omgivningen, inklusive tal och trådlösa ljudenheter. Den här enheten gör det även möjligt för användare av trådlösa hörapparater att styra hörapparatens funktioner.

Den är avsedd att användas av barn (> 36 månader) och vuxna tillsammans med hörapparater.

Översikt över status- och strömindikatorer

Statusindikator



Beskrivning



Blinkar gult

Söker efter hörapparater.



Gul

Viloläge: Ansluten till hörapparater. **Inte** ansluten till en mobiltelefon eller annan enhet.



Blinkar blått

StreamLine Mic är synlig för en mobiltelefon för parkoppling.



Beskrivning



Blå

Telefonläge: Ansluten till en mobiltelefon.



Blinkar grönt

Inkommande samtal.



Grön

I ett samtal.



Orange

Strömmar musik.



Magenta

Fjärrmikrofonläge.



Beskrivning



Blinkar magenta

Återansluter fjärrmikrofon.

Strömindikator



Beskrivning



Röd


Batteriets kapacitet är låg.





Blinkar grönt


Laddar medan enheten är på.

Beskrivning

-  Grönt som avtar
Laddning är slutförd och StreamLine Mic är påslagen.

 -  Grön
Påslagen, laddar inte.

 -  Blinkar orange
Laddar medan enheten är av.

 -  Orange
Laddning är slutförd och StreamLine Mic är avslagen.
-

Förklaring av symboler

Symboler som används i den här dokumentationen



Indikerar en situation som kan leda till allvarliga, måttliga eller mindre personskador.



Indikerar möjlig produktskada.



Råd och tips om hur du kan använda din apparat på bästa sätt.

Symboler på enhet eller förpackning



Etikett med CE-märkning, bekräftar att vissa Europeiska direktiv är uppfyllda, se avsnitt "Försäkran om överensstämmelse".



EMC och etikett beträffande uppfyllelse för radiokommunikation, Australien, se avsnittet "Försäkran om överensstämmelse".



Indikerar enhetens juridiska tillverkare.



Kasta inte enheten i hushållssoporna. Läs mer i avsnittet "Återvinningsinformation".



Symboler på enhet eller förpackning



Läs och följ instruktionerna i användarguiden.

Underhåll och skötsel



OBSERVERA

- ▶ Läggs inte apparaten i vatten!
- ▶ Rengör inte apparaten med alkohol eller bensin.



- ▶ Rengör apparaten med en mjuk trasa vid behov.
- ▶ Undvik slipande rengöringsmedel med tillsatser som citron, ammoniak osv.

Teknisk information

Kompatibla hörapparater

StreamLine Mic fungerar med våra specifika trådlösa hörapparater. Din audionom informerar dig om vilka modeller som passar.

Drift-, transport- och förvaringsförhållanden

Driftförhållanden

Temperatur	5 till 40 °C (41 till 104 °F)
Relativ luftfuktighet	15–93 %, icke-kondenserande
Lufttryck	700 till 1 060 hPa

Vid längre transport- eller förvaringsperioder ska följande förhållanden beaktas:

Transport och förvaring

Temperatur -20 till 70 °C (-4 till 158 °F)

Luftryck 700 till 1 060 hPa



FARA

Risk för skada, brand eller explosion under frakt.

► Frakta StreamLine Mic enligt lokala bestämmelser.

För andra delar, t.ex. hörapparater, kan andra villkor gälla.

Tekniska data beträffande strömmatningen

Ingående spänning:	100-240 V AC
Ingående ström:	max. 0,2 A vid 100 V AC
Ingångsfrekvens:	47–63 Hz
Utspänning:	5 V DC
Utström:	max. 1 A

Återvinningsinformation

Återvinn enheter, tillbehör och förpackning enligt lokala bestämmelser.

Försäkran om överensstämmelse

CE-märkningen visar att produkten överensstämmer med följande europeiska direktiv och bestämmelser:

- 2017/745 gällande medicinsk utrustning
- 2014/53/EU gällande radioutrustning
- 2011/65/EU gällande begränsning av farliga ämnen

Du kan få försäkran om överensstämmelse i sitt fullständiga format från www.wsaud.com/signia.

Trådlös funktion


Enheten innehåller en radiosändare som använder Bluetooth EDR, Bluetooth Low Energy (BLE) och en egenutvecklad radioteknik med kort räckvidd som fungerar

vid 2,4 GHz. Radiosändaren på 2,4 GHz är svag och ligger alltid under 17 dBm e.i.r.p. i total utstrålad effekt.

Enheten uppfyller internationella standarder gällande radiosändare, elektromagnetisk kompatibilitet och människors exponering.

Information om FCC- och ISED-överensstämmelse finns bak på enheten.



ACMA-märkningen  intygar att enheten uppfyller standarden om elektromagnetiska störningar som fastställts av Australian Communications and Media Authority (ACMA). Enheter med FCC märkningen överensstämmer med FCC-standarderna avseende elektromagnetiska störningar.

Denna digitala apparat av klass B uppfyller den kanadensiska normen ICES-003.

Denna apparat överensstämmer med del 15 i FCC-bestämmelserna och med ISED:s licensundantag för RSS.

Användning får ske under följande två förutsättningar:

- Enheten får inte förorsaka skadliga störningar och
- enheten måste tåla eventuella mottagna störningar, inklusive störningar som kan ha oönskade effekter.

Denna utrustning har testats och anses uppfylla gränserna för en digital klass B-enhet, enligt del 15 i FCC-standarderna. Dessa gränser är fastställda för att ge rimligt skydd mot skadliga störningar i bostäder. Denna utrustning skapar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi,

och om den inte installeras enligt instruktionerna kan den förorsaka skadliga störningar på radiokommunikation. Det finns dock ingen garanti för att störningar inte kan uppstå i en given installation. Om denna utrustning orsakar skadliga störningar vid radio- eller TV-mottagning, vilka kan fastställas genom att stänga av och slå på utrustningen, uppmanas användaren att försöka åtgärda störningarna genom en eller flera av följande åtgärder:

- Rikta eller placera om den mottagande enheten.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Anslut utrustningen till ett uttag som är anslutet till en annan krets än den mottagaren är ansluten till.
- Rådgör med återförsäljaren eller en kvalificerad radio-/TV-tekniker för hjälp.

FCC-varning: Ändringar eller modifikationer som inte uttryckligen godkänts av den som ansvarar för överensstämmelse kan ogiltigförklara användarens rätt att använda utrustningen.



WSAUD A/S
Nymøllevej 6
3540 Lyngø
Danmark

Din kontakt i Sverige

Sivantos A/S
Box 1183
164 26 Kista
Telefon 08 400 22 390

Document No. 03384-99T05-5300 SV

Order/Item No. 109 520 33

Master Rev05, 08.2024

www.wsaud.com

© 10.2024, WSAUD A/S. All rights reserved



www.signia.net